

Vakuum-Rohr mit Schraubstock-Halterung Gebrauchsanweisung



Wilhelm Julius Teufel GmbH
Robert-Bosch-Straße 15
73117 Wangen
Deutschland/Germany
Phone: +49 (0)7161 15684-0
Fax: +49 (0)7161 15684-333
www.wjt-ortho.com



90.395.166.00 Rev. 2022/07 © Wilhelm Julius Teufel GmbH



Beschreibung

Das Vakuum-Rohr mit Schraubstock-Halterung ist zum Einspannen von Modellen mit anschließenden Arbeiten mit- und unter Vakuum vorgesehen. Mit Hilfe der Schraubstock-Halterung können Sie das Produkt ohne Probleme und ohne Beschädigung des Vakuum-Rohrs überall dort einspannen, wo Sie es benötigen. Die Vierkant-Ofenhalterung ist für das Ausbacken von Prepregarbeiten sowohl in Umluftöfen als auch in Infrarotöfen geeignet.

Die Halterung ist für alle gängigen Orthopädietechniken geeignet:

- Tiefziehtechnik
- Silikontechnik
- Prepregtechnik
- Gieß- und Laminieretechnik

⚠ Die Ofenhalterung ist nur für Temperaturen bis 150°C geeignet. Höhere Temperaturen können das Material angreifen, wodurch die Funktion nicht mehr gewährleistet werden kann.

⚠ Sicherheit

- Bitte beachten Sie, dass sich die Produkte durch die Verwendung im Ofen erhitzen. Verwenden Sie daher bei Arbeiten am und mit dem Ofen Handschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Bitte achten Sie auf ein ordnungsgemäßes Einspannen der Produkte. Ein Herunterfallen kann Schäden und Verletzungen verursachen.
- Bitte achten Sie bei „hängenden“ Gießharzarbeiten darauf, das Vakuum-Rohr gut innerhalb der eingefrästen Nut zu sichern.

Lieferumfang für Vakuum-Rohr mit Schraubstock-Halterung

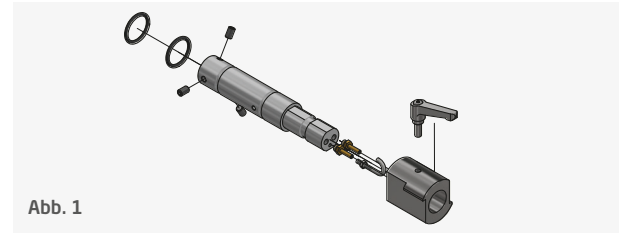


Abb. 1

Explosionszeichnung Vakuum-Rohr und Schraubstock-Halterung

REF	Produktbezeichnung
60.301.010.01	Vakuum-Rohr m.Schraubstock-Halterung
60.301.010.02	Vakuum-Rohr
60.301.010.03	Schraubstock-Halterung f.Vakuum-Rohr

Zubehör

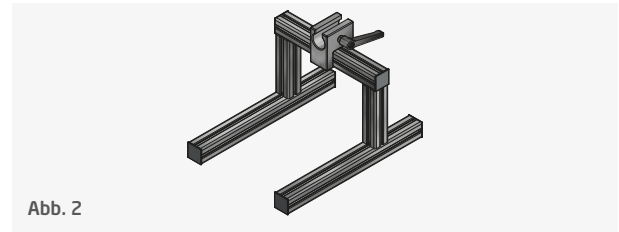


Abb. 2

Vierkant-Ofenhalter und Gestell

REF	Produktbezeichnung
60.301.010.04	Gestell f.Vierkant-Ofenhalter
60.301.010.05	Vierkant-Ofenhalter
60.002.255.00	Gewindedorn f.Fräsmo- delles 255mm

Die Gebrauchsanleitung ist für alle Produkte aus dem Segment Vakuum-Halterung gültig. Je nach Bestellung variiert jedoch der Lieferumfang. Untereinander sind alle auf Abb. 1 und 2 dargestellten Produkte miteinander kompatibel und aufeinander abgestimmt, die Produkte können jedoch auch einzeln verwendet werden.