

META™ Arc

Mit Sicherheit die richtige Wahl.



Was ich am META™ Arc besonders schätze?

- ▶ Das angenehm geringe Gewicht und die Wasserfestigkeit des Fußes.
- ▶ Das wirklich tolle Abrollverhalten. Einfach eine runde Sache!
- ▶ Jetzt stehe ich endlich mit dem ganzen Fuß auf dem Boden, egal auf welchem Untergrund!

◆ META™ Arc




WW.M002-XXX-0X

Der META Arc ist ein Prothesenfuß mit revolutionärem Design und Funktion. Auffälligstes Merkmal ist das ARC Titan-Knöchelgelenk mit Inversions-/Eversions-Beweglichkeit. Gelagert auf zwei Titanachsen, erlaubt das Knöchelgelenk eine permanente Anpassung an den Untergrund mit einem ROM von 20° (Inversion 10° / Eversion 10°).

Die gesamte Carbonfeder des Fußes ist in einem Stück laminiert, so dass keine Schraubverbindung zwischen Ferse und Vorfußfeder benötigt wird. Aufgrund dieser Konstruktion ohne Unterbrechung des Kraftflusses im Fuß, wird eine Energierückgabe von ca. 95 % erreicht.

Die Fußkosmetik des META Arc ist mit einer getrennten Großzehe ausgestattet, so dass auch Sandalen mit Mittelsteg getragen werden können.

👍 Anwendungstipp:

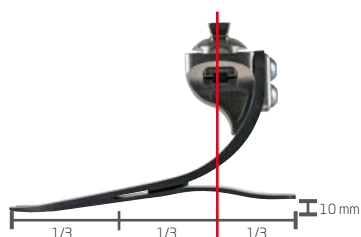

Sagittal den Fuß in 3/3 einteilen. Der Verlauf der Belastungslinie soll zwischen dem mittleren und hinteren Drittel verlaufen.

Technische Beschreibung

Gewicht des Fußes/g	718 (Gr. 26, Kat. 5, inkl. Kosmetik und Spektrasocke)
Max. Belastbarkeit/kg	166
Fußgrößen/cm	22 - 30
Systemhöhe*/mm	113
Absatzhöhe/mm	10
Proximaladapter	Pyramidadapter
Kategorie	1 - 9

*Systemhöhe/mm: gemessen inkl. Kosmetik, von distal Standfläche Fuß bis proximal Auflagefläche Rohradapter (ohne Fußpyramide)



Beim statischen Aufbau muss das Knöchelgelenk in der Frontalebene mittig positioniert werden.



Beweglichkeit des Knöchelgelenks Inversion 10° / Eversion 10°

1: Auswahl der META Arc Carbonfeder, links

Größe	Kategorie				
	1	2	3	4	
22	WW.M002-22L-01	WW.M002-22L-02	WW.M002-22L-03	WW.M002-22L-04	
23	WW.M002-23L-01	WW.M002-23L-02	WW.M002-23L-03	WW.M002-23L-04	
24	WW.M002-24L-01	WW.M002-24L-02	WW.M002-24L-03	WW.M002-24L-04	
25	WW.M002-25L-01	WW.M002-25L-02	WW.M002-25L-03	WW.M002-25L-04	
26	WW.M002-26L-01	WW.M002-26L-02	WW.M002-26L-03	WW.M002-26L-04	
27	WW.M002-27L-01	WW.M002-27L-02	WW.M002-27L-03	WW.M002-27L-04	
28	WW.M002-28L-01	WW.M002-28L-02	WW.M002-28L-03	WW.M002-28L-04	
29	WW.M002-29L-01	WW.M002-29L-02	WW.M002-29L-03	WW.M002-29L-04	
30	WW.M002-30L-01	WW.M002-30L-02	WW.M002-30L-03	WW.M002-30L-04	

1: Auswahl der META Arc Carbonfeder, rechts

Größe	Kategorie				
	1	2	3	4	
22	WW.M002-22R-01	WW.M002-22R-02	WW.M002-22R-03	WW.M002-22R-04	
23	WW.M002-23R-01	WW.M002-23R-02	WW.M002-23R-03	WW.M002-23R-04	
24	WW.M002-24R-01	WW.M002-24R-02	WW.M002-24R-03	WW.M002-24R-04	
25	WW.M002-25R-01	WW.M002-25R-02	WW.M002-25R-03	WW.M002-25R-04	
26	WW.M002-26R-01	WW.M002-26R-02	WW.M002-26R-03	WW.M002-26R-04	
27	WW.M002-27R-01	WW.M002-27R-02	WW.M002-27R-03	WW.M002-27R-04	
28	WW.M002-28R-01	WW.M002-28R-02	WW.M002-28R-03	WW.M002-28R-04	
29	WW.M002-29R-01	WW.M002-29R-02	WW.M002-29R-03	WW.M002-29R-04	
30	WW.M002-30R-01	WW.M002-30R-02	WW.M002-30R-03	WW.M002-30R-04	

2: Auswahl der Fußkosmetik

REF	Fußgröße/cm	Seite
WW.FS01-22LB	22	Links
WW.FS01-23LB	23	Links
WW.FS01-24LB	24	Links
WW.FS01-25LB	25	Links
WW.FS01-26LB	26	Links
WW.FS01-27LB	27	Links
WW.FS01-28LB	28	Links
WW.FS01-29LB	29	Links
WW.FS01-30LB	30	Links

REF	Fußgröße/cm	Seite
WW.FS01-22RB	22	Rechts
WW.FS01-23RB	23	Rechts
WW.FS01-24RB	24	Rechts
WW.FS01-25RB	25	Rechts
WW.FS01-26RB	26	Rechts
WW.FS01-27RB	27	Rechts
WW.FS01-28RB	28	Rechts
WW.FS01-29RB	29	Rechts
WW.FS01-30RB	30	Rechts

	5	6	7	8	9
	WW.M002-22L-05				
	WW.M002-23L-05				
	WW.M002-24L-05				
	WW.M002-25L-05	WW.M002-25L-06	WW.M002-25L-07	WW.M002-25L-08	WW.M002-25L-09
	WW.M002-26L-05	WW.M002-26L-06	WW.M002-26L-07	WW.M002-26L-08	WW.M002-26L-09
	WW.M002-27L-05	WW.M002-27L-06	WW.M002-27L-07	WW.M002-27L-08	WW.M002-27L-09
	WW.M002-28L-05	WW.M002-28L-06	WW.M002-28L-07	WW.M002-28L-08	WW.M002-28L-09
	WW.M002-29L-05	WW.M002-29L-06	WW.M002-29L-07	WW.M002-29L-08	WW.M002-29L-09
	WW.M002-30L-05	WW.M002-30L-06	WW.M002-30L-07	WW.M002-30L-08	WW.M002-30L-09

	5	6	7	8	9
	WW.M002-22R-05				
	WW.M002-23R-05				
	WW.M002-24R-05				
	WW.M002-25R-05	WW.M002-25R-06	WW.M002-25R-07	WW.M002-25R-08	WW.M002-25R-09
	WW.M002-26R-05	WW.M002-26R-06	WW.M002-26R-07	WW.M002-26R-08	WW.M002-26R-09
	WW.M002-27R-05	WW.M002-27R-06	WW.M002-27R-07	WW.M002-27R-08	WW.M002-27R-09
	WW.M002-28R-05	WW.M002-28R-06	WW.M002-28R-07	WW.M002-28R-08	WW.M002-28R-09
	WW.M002-29R-05	WW.M002-29R-06	WW.M002-29R-07	WW.M002-29R-08	WW.M002-29R-09
	WW.M002-30R-05	WW.M002-30R-06	WW.M002-30R-07	WW.M002-30R-08	WW.M002-30R-09

Ersatz-Spektrasocke

REF	Produkt
WW.700-SS002	WillowWood Spectra-Socke schwarz

Weitere Versionen dieser Fußkosmetik in den Farben tan oder medium brown sind als Sonderbestellung unter REF: WW.FS01-X erhältlich.

Bestellinformationen

Die folgenden Bestellschritte führen Sie zur REF des von Ihnen ausgewählten Fußes.

Auswahl der Kategorie Carbonfeder

Erweitertes Körpergewicht = Körpergewicht + normalerweise vom Amputierten getragene Lasten.

Wählen Sie aus der nachfolgenden Tabelle die Kategorie der Carbonfeder aus.

Erweitertes Körpergewicht/kg	Niedrige Aktivität/ Kategorieempfehlung		Mittlere Aktivität/ Kategorieempfehlung		Hohe Aktivität/ Kategorieempfehlung	
	Fußgröße 22-24 cm	Fußgröße 25-30 cm	Fußgröße 22-24 cm	Fußgröße 25-30 cm	Fußgröße 22-24 cm	Fußgröße 25-30 cm
45 - 51	1	1	1	1	2	2
52 - 58	1	1	2	2	3	3
59 - 67	2	2	3	3	4	4
68 - 76	3	3	4	4	5	5
77 - 87	4	4	5	5	-	6
88 - 99	5	5	-	6	-	7
100 - 115	-	6	-	7	-	8
116 - 130	-	7	-	8	-	9
131 - 147	-	8	-	9	-	-
148 - 166	-	9	-	-	-	-

Benötigte Komponenten für den META Arc Fuß

Um einen META Arc Fuß komplett zu bestellen, sind 2 Komponenten notwendig.

(Anwendungsbeispiel: benötigt wird ein Fuß der Größe 26, rechts. Es wird die Fußfeder Gr. 26 rechts in der gewünschten Kategorie benötigt, sowie die Fußkosmetik Gr. 26, rechts.)


1 Wählen Sie zunächst die geeignete Kategorie der Fußfeder:

META Arc Fußfeder

2 Wählen Sie nun die gewünschte Fußkosmetik:

Fußkosmetik

Die Lieferung der Fußkosmetik erfolgt inkl. Spectrasocke

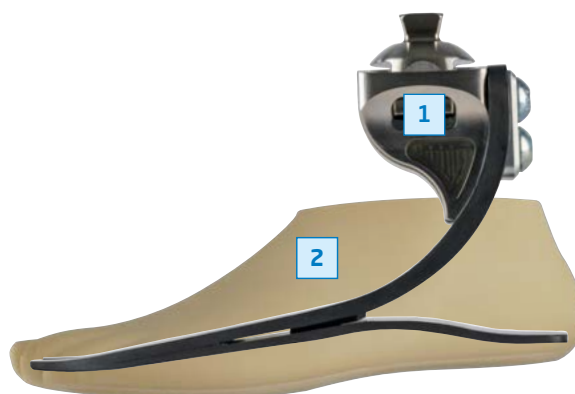

◆ Anwendermeinungen

Die Funktionalität des neuen META Arc Fußes bietet echten Alltagsnutzen. Wir haben einige unserer Anwender gefragt, was ihnen am META Arc besonders gut gefällt.

“
*Er ist schön dynamisch,
gleichzeitig aber ange-
nehm weich. Einfach sehr
ausgewogen und damit
echt angenehm zu laufen!*
”

“
*Was mich beeindruckt ist, wie sich der
Fuß an mich anpasst. Zuerst war ich
skeptisch wegen des seitlich beweg-
lichen Knöchels, aber das ist wirklich
eine tolle Sache!*
”

“
*Ich muss viel weniger auf
den Untergrund achten!
Das Knöchelgelenk passt
sich super an Unebenheiten
und Schrägen an.*
”

“
*Der Fuß rollt sehr
rund und harmonisch
ab. Nicht nur wenn
ich schnell laufe,
sondern auch bei
langsamem Tempo.*
”

“
*Ein toller Fuß, auch im Sommer! Ich kann
mit ihm in Sandalen und Flip-Flops laufen.
Und wasserfest ist er auch!*
”



Wilhelm Julius Teufel GmbH
Robert-Bosch-Straße 15
73117 Wangen
Deutschland/Germany
Phone: +49 (0)7161 15684-0
Fax: +49 (0)7161 15684-333
www.teufel-international.com
www.wjt-ortho.com

